

SICHERHEITSINFORMATION

Batterie für den Defibrillator FRED easy

Beschreibung:


Anwender des Defibrillators FRED easy haben berichtet, dass neue Batterien die Fehleranzeige "BATTERIE LEER" verursachen, wenn sie in einen Defibrillator FRED easy eingesetzt werden.

Risiko:

Batterien mit diesem Defekt können nicht verwendet werden. Der Fehler wird durch den FRED easy bei der Inbetriebnahme / beim Einsetzen der Batterie automatisch erkannt und angezeigt.

Betroffene Batterien:

Von dieser Sicherheitsinformation sind Batterien für den Defibrillator FRED easy, mit der Referenz 4-07-0001 und den Losnummern HYB 16-0056, HYB 16-0057, HYB 16-0058 sowie HYB 16-0059 betroffen.

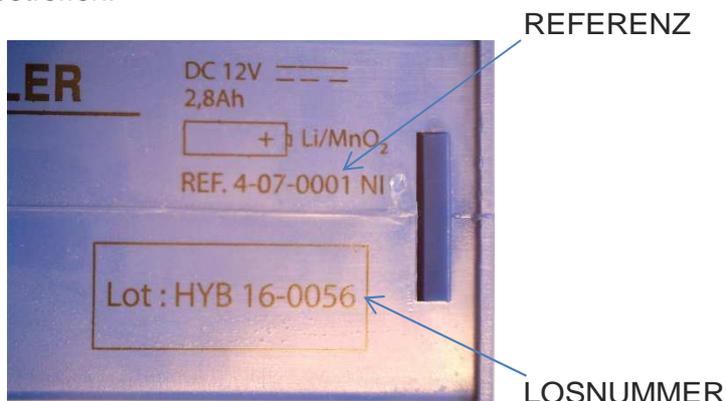

Sofort Maßnahmen:

Wenn Sie zwischen dem 1. Oktober 2016 und 18. Januar 2017 eine neue Batterie (Referenz 4-07-0001) oder einen Defibrillator FRED easy erworben haben, ist möglicherweise Ihre Batterie von dieser Sicherheitsinformation betroffen.

Die Batterien der oben genannten Chargen müssen getestet werden, um sicherzustellen, dass sie in Ihrem FRED easy verwendet werden können. Überprüfen Sie auch Ihre Ersatzbatterien. Das Verfahren wird unten beschrieben.



THE ART OF DIAGNOSTICS

Lösung: Test Prozedur /Verfahren:

Setzen Sie die Batterie in Ihren FRED easy ein (Gebrauchsanleitung: „3.1 Einsetzen der Batterie“)
Das Gerät führt automatisch den Selbsttest durch. Am Ende des Selbsttestes schaltet sich der Defibrillator aus und der „grüne Indikator“ **blinkt**.



In diesem Fall ist die Batterie konform und kann ohne Einschränkung verwendet werden.

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
Sollte aber nach dem Selbsttest der „grüne Indikator“ Ihres FRED easy **aus** bleiben, und das Display folgendes anzeigen:



ist die Batterie defekt.

In diesem Fall wenden Sie sich sofort an Ihren SCHILLER Händler, Ihre Batterie wird kostenlos ersetzt.

Wissembourg, den 19 Januar 2017



THE ART OF DIAGNOSTICS