

Smiths Medical Deutschland GmbH

IK330913435

Bretonischer Ring 3 D-85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0) 89 242959 0 Fax: +49 (0) 89 242959 100

Smiths Medical Deutschland GmbH · Bretonischer Ring 3 · D-85630 Grasbrunn

Bearbeiter/In
Tel-Durchw.
email
Datum

Product Management Notice

██████████@smiths-medical.com
20.07.2010

**Betreff: Level 1® Fast-Flow Infusionswärmer
Produktverbesserung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Smiths Medical hatte Sie bereits im vergangenen Jahr über eine entscheidende Produktverbesserung der DI-Infusionssets für die Level 1® Fast Flow Infusionswärmer informiert.

Wir möchten Sie heute darauf aufmerksam machen, dass die Auslieferung der neuen Level1® DI-Infusionssets mit dem F-50-Modul, einem verbesserten Gasabscheider/Filter, ab August (Auslieferung voraussichtlich ab 01.08.2010) beginnt. Der F-50 wird den aktuellen Gasabscheider/Filter (F-10 bzw. F-30) ersetzen.

Diese Produktverbesserung dient der Minimierung des Luftembolierisikos im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung bei den Level 1® H-1200 bzw. Level 1® H-1000 Fast Flow Infusionswärmern, welche mit einem Luftdetektor ausgestattet sind und wird bei allen Level 1® DI-Infusionssets Standard sein¹.

Merkmale und Vorteile der neuen Level 1® DI-Infusionssets:

- hoher Schutz vor Luftembolien, unabhängig vom Status der Stromversorgung des Level 1® Fast Flow Infusionswärmers
- keine Leistungseinschränkung der Level 1® DI-Infusionssets
- Level 1® DI-Infusionssets mit F-50 Gasabscheider/Filter verfügen über 170µ Partikelfilter

Durch die Level 1® DI-Infusionssets mit F-50 Gasabscheider/Filter kommt es zu geringfügigen Änderungen bei der Vorbereitung des Sets – die Hardware bleibt unverändert – so dass das System seine hohe Anwenderfreundlichkeit behält und nur geringer Nachschulungsbedarf besteht.

¹ Das F-50 Gasabscheider/Filter-Modul ist mit den alten Level 1® Fast Flow Flüssigkeitenwärmern H-500 und H-250 nicht kompatibel.

Smiths Medical Deutschland GmbH – a subsidiary of Smiths Group plc Sitz: Grasbrunn
Bankverbindung: Deutsche Bank AG München Konto-Nr. 20199903 BLZ 700 700 10 SWIFT: DEUTEMM, IBAN DE 87 7007 0010 0201 999000 Ust.-Id. Nr. DE 204256472 St.Nr. 114/118/40282
EAR-Registriernummer: DE 51793324 Handelsregister: München HRB 122825 Gerichtsstand: München Geschäftsführer: Martin Jamieson – Frank Mathe

Um Sie als Anwender schon jetzt mit den neuen Systemen vertraut zu machen, möchten wir Sie auf unseren Weblink www.smiths-medical.com/F-50 aufmerksam machen. Auf unserer Internetseite finden Sie wertvolle Informationen, sowie einen Film, der die Installation und Anwendung des F-50 Gasabscheider/Filter erklärt.

Beginnend mit dem 3. Quartal 2010 (Auslieferung voraussichtlich ab 01.08.2010) werden Level 1[®] DI-Infusionssets mit F-50 Gasabscheider/Filter die aktuellen Produkte in Europa ersetzen. Ab diesem Zeitraum werden die bestehenden Bestellnummern für DI-Infusionssets auf neue Bestellnummern umgestellt. Nachfolgend sind die neuen Bestellnummern aufgelistet:

Bisherige Artikelnummer/ REF	Neue Artikelnummer/ REF
DI-50	DI-75
DI-60HL	DI-65HL
DI-100	DI-150
DI-300	DI-350
F-10/ F-30	F-50

Es ist unser Ziel durch kontinuierliche Produktverbesserung Ihnen alle Optionen zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihre Patienten so optimal und sicher wie möglich versorgen können – bei gewohnter Zuverlässigkeit der Produkte.

Übrigens Sie profitieren von unserer Produktverbesserung gleich doppelt – höhere Anwender- und Patientensicherheit zum gleichen Preis, denn Sie erhalten die neuen Systeme zu den bisher gültigen Preisen und Konditionen.

Mit freundlichen Grüßen



Product Manager
Smiths Medical Deutschland GmbH



Director Services
Smiths Medical Deutschland GmbH

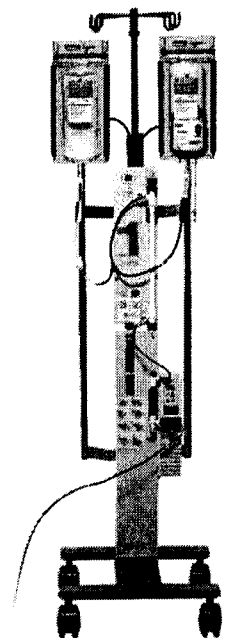


Bild: Level 1[®] H-1200 Fast Flow Infusionswärmer