

## Wichtige Informationen

Der Patientenpass soll dazu dienen, Medikationsfehler – vor allem eine Unterdosierung des Arzneimittels – zu vermeiden.

- ❖ Eine Arzneimittelunterdosierung kann auftreten, wenn sich der On-Body-Injektor von Ihrer Haut löst, undicht ist oder andere Fehlfunktionen aufweist.
- ❖ Wenn dies vorkommt, besteht für Sie das erhöhte Risiko einer schwerwiegenden Infektion.

Für weitere Informationen:

- ❖ Lesen Sie die Packungsbeilage, die dem On-Body-Injektor beiliegt.
- ❖ Besuchen Sie folgende Internetseite:  
<https://fachkreise.amgen.de/Service/Arzneimittelinformationen/index.html>

Die folgenden Aktivitäten können die Funktionsfähigkeit des On-Body-Injektors beeinträchtigen:

- ❖ **Klopfen Sie nicht** gegen den On-Body-Injektor und ziehen Sie nicht an ihm!
- ❖ **Wenden Sie keine** Lotionen, Cremes, Öle oder Reinigungsmittel in der Nähe des On-Body-Injektors an!
- ❖ **Liegen Sie nicht** auf dem On-Body-Injektor und üben Sie keinen Druck auf ihn aus, während Sie ihn tragen!
- ❖ **Setzen Sie** den On-Body-Injektor weder CT, MRT, Röntgen, Ultraschall, Bestrahlung oder Überdruckkammern aus!
- ❖ **Tragen Sie** weite Kleidung und seien Sie vorsichtig beim Kleidungswechsel!
- ❖ **Halten Sie** den On-Body-Injektor mindestens 10 cm fern von elektrischen Geräten (wie z. B. Mobiltelefonen oder Mikrowellengeräten)!

**Bitte lesen Sie diesen Pass durch und tragen Sie ihn bei sich.**

*Das medizinische Fachpersonal wird die folgenden Informationen eintragen.*

**Anbringen des On-Body-Injektors auf Ihrer Haut:**

\_\_\_\_\_  
*Datum                      Zeit                      vor-/nachmittags*

**Geschätzter Start Ihrer Injektion:**

\_\_\_\_\_  
*Datum                      Zeit                      vor-/nachmittags*

**Chargenbezeichnung des On-Body-Injektors:**

**KONTAKTINFORMATIONEN FÜR DEN NOTFALL**

**Name und Telefonnummer des medizinischen Fachpersonals:**

\_\_\_\_\_  
*Nachname, Vorname*

\_\_\_\_\_  
*Telefonnummer*

**Kontaktinformationen für Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Wie der On-Body-Injektor überwacht wird

- ❖ Während der ersten 27 Stunden, in denen Sie den On-Body-Injektor tragen, werden Sie eine langsam blinkende, grüne Statusanzeige sehen.
- ❖ Zwei Minuten vor Beginn der Injektion werden Sie eine Reihe von Signaltönen hören.
- ❖ Sobald die Injektion beginnt, werden Sie eine schnell blinkende, grüne Statusanzeige sehen.
- ❖ Die Injektion wird 45 Minuten dauern.
- ❖ Am Ende der Injektion werden Sie einen langen Signalton hören und die Statusanzeige wird dauerhaft grün leuchten.
- ❖ Jetzt können Sie den On-Body-Injektor langsam entfernen. Überprüfen Sie, ob er leer ist.

- **Kontaktieren Sie umgehend das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Probleme mit dem On-Body-Injektor bzw. Symptome einer Infektion wie z. B. Fieber, Schüttelfrost oder Schwitzen haben!**
- **Versuchen Sie weder den On-Body-Injektor zu befestigen, wenn er sich gelockert hat, noch ihn erneut anzubringen, wenn er sich gelöst hat!**

## Kontaktieren Sie umgehend das medizinische Fachpersonal, wenn eine der folgenden Situationen eintritt – Sie haben möglicherweise nicht Ihre vollständige Dosis erhalten:

- Die Statusanzeige blinkt rot.




- Die Klebefolie (der Teil, der Ihre Haut berührt) ist merklich durchnässt und/oder es sind Tropfen darauf zu sehen.



- Die Klebefolie löst sich von der Haut, bevor die Injektion abgeschlossen ist.



- Wenn nach der 45-minütigen Injektionszeit die Markierungslinie der Füllstandanzeige nicht bei 0% ist.

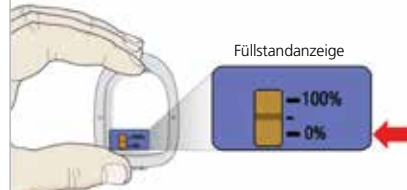

**VERSUCHEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN den On-Body-Injektor zu befestigen, wenn er sich gelockert hat, oder ihn erneut anzubringen, wenn er sich gelöst hat.**

Neulasta®  
(Pegfilgrastim)



## Patientenpass für den On-Body-Injektor

- ❖ **Bitte öffnen Sie diesen Pass und lesen Sie alle Seiten.**
- ❖ **Tragen Sie ihn bei sich.**
- ❖ Dieser Pass ist verpflichtender Teil der Zulassung und enthält wichtige Sicherheitsinformationen zur Behandlung mit dem On-Body-Injektor für Pegfilgrastim.
- ❖ Zeigen Sie diesen Pass dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie umgehend medizinische Hilfe bezüglich des On-Body-Injektors benötigen!