

Dringender SICHERHEITSHINWEIS, Getinge WD15 Claro

Gerätmangel	Datum	Ref. no.
Potentielle Wasserleckage	<i>JUNI 2018</i>	CCS219711
Betroffenes Produkt:	Betroffene Seriennummer (siehe nächste Seite)	
Getinge WD15 Claro, Modell GE15	WAA078527 bis WAA079522 WAA082404 bis WAA085431 und WAA085543	
Mängelbeseitigung		

Nur Benachrichtigungsschreiben. Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels werden in einer späteren Benachrichtigung mitgeteilt.

Sehr geehrter Kunde,

hiermit informieren wir Sie über eine mögliche Wasserleckage bei einer begrenzten Anzahl von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten des Typs GE15. Wenn das Problem auftritt, wird sowohl ein akustischer als auch ein optischer Alarm auf dem Display des Geräts ausgelöst. Diese Leckage kann während des Betriebs im letzten Teil des Reinigungs- und Desinfektionszyklus auftreten.

Wenn keine Problembehandlung stattfindet, kann von der Wasserversorgung kaltes Wasser austreten und in die Anlage gelangen. Erfolgt keine Reaktion auf den Alarm, kann eine beträchtliche Menge Wasser auf den Boden gelangen, sodass dieser rutschig wird. Infolgedessen sind Stürze und Verletzungen sowie mögliche Wasserschäden nicht auszuschließen.

Empfohlene, vom Kunden zu ergreifende Maßnahmen

Es wird empfohlen, die Anlage nicht unbeaufsichtigt zu betreiben. Das gilt insbesondere in dem Fall, in dem Wasser nicht in den Gebäudeablauf abgeleitet werden kann. Bitte reagieren Sie sofort, wenn die Anlage einen Alarm auslöst.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, gehen Sie wie folgt vor:


- Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- Schließen Sie die Absperrventile in der Wasserversorgung.
- Setzen Sie sich mit dem Kundendiensttechniker in Verbindung.

Diese Sicherheitshinweise beinhalten wichtige Informationen für den weiteren sicheren und sachgemäßen Betrieb Ihrer Geräte.

Dringender SICHERHEITSHINWEIS, Getinge WD15 Claro

Position der Seriennummer

Die Seriennummer des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts befindet sich auf dem Typenschild der Anlage.

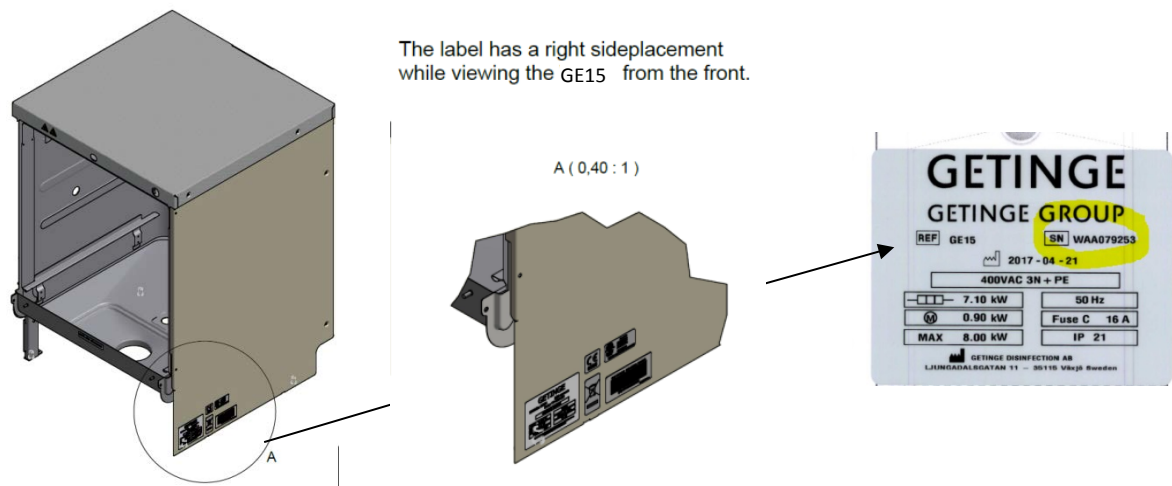

Übermittlung dieser Benachrichtigung:

Stellen Sie bitte sicher, dass alle betroffenen Mitarbeiter, die die Anlage verwenden, umfassend über den Inhalt dieser Benachrichtigung informiert werden. Beachten Sie diese Informationen bis auf Weiteres.

Weitere Informationen und Unterstützung

Wir bedauern etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen hierdurch entstehen. Wir untersuchen dieses Problem mit größter Sorgfalt und gehen derzeit der Ursache auf den Grund, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Wir setzen uns unverzüglich mit Ihnen in Verbindung, sobald eine Lösung verfügbar ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlage haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Getinge-Vertretung.

Mit freundlichen Grüßen



Getinge Deutschland GmbH