

DRINGENDER

Information zur Bedienung des Patiententisches

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des MR-Systems OASIS.

Betroffene Geräte:

Produktname: OASIS

Beschreibung des Problems:

Hitachi hat festgestellt, dass sich ein Bediener an den Fingern verletzen könnte, wenn er die Kante des Edelstahlbandes unter der Tischplatte berührt.

Hitachi wird den Patiententisch im Rahmen einer Korrekturmaßnahme mit Schutzabdeckungen versehen, um zu verhindern, dass die Finger mit dem Edelstahlband in Berührung kommen können.

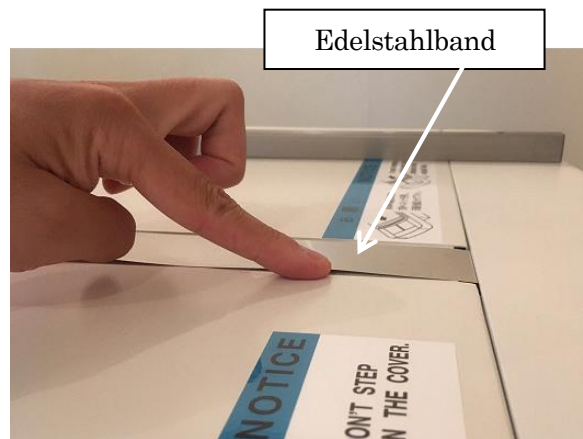


Abb. 1: Edelstahlband

Vom Anwender durchzuführende Maßnahmen:

Achten Sie bei der Bedienung des Patiententischs darauf, das Edelstahlband nicht mit den Fingern zu berühren.

Hitachi plant, mit der Nachrüstung der Schutzabdeckungen ab März 2018 zu beginnen. Hitachi wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald die Schutzabdeckungen verfügbar sind, um einen Termin für die Korrekturmaßnahme in Ihrer Einrichtung zu vereinbaren.

Weiterleitung dieses Sicherheitshinweises:

Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis an alle zuständigen Mitarbeiter in Ihrer Einrichtung oder die Einrichtung weiter, an die Sie das potenziell betroffene Gerät abgegeben haben.

Geographische Verteilung:

USA, Japan, Italien, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Niederlande, Russland, Algerien, Slowakei

Ansprechpartner:

Den für Sie zuständigen Ansprechpartner können Sie dem Anschreiben Ihrer örtlichen Vertriebsgesellschaft zu diesem dringenden Sicherheitshinweis entnehmen.

Wir bestätigen, dass dieser Fall der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde gemeldet wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Hitachi, Ltd.