

Löwenstein Medical Technology | Postfach 54 02 68 | 22502 Hamburg | Deutschland

«Name»  
«Kontaktperson»  
«Straße»  
«PLZ» «Ort»  
«Land»

Datum: 05.05.2022

### Sicherheitsinformation

**Rückruf der Beatmungsgeräte prismaVENT 30, prismaVENT 30-C, prismaVENT 40, TIVAN 30 und TIVAN 40.**

**Betroffen ist ausschließlich eine im April 2022 ausgelieferte Charge.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Qualität und Sicherheit haben für uns höchste Priorität. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, den folgenden Rückruf im Zusammenhang mit einer potentiellen Gefährdung durch den Ausfall oder die Beeinflussung der Beatmungsfunktion der Geräte prismaVENT 30, prismaVENT 30-C, prismaVENT 40, TIVAN 30 und TIVAN 40 zu veröffentlichen.

**Absender:**

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

**Adressat:**

Händler, Betreiber und Anwender der Beatmungsgeräte prismaVENT 30, prismaVENT 30-C, prismaVENT 40, TIVAN 30 und TIVAN 40.

**Identifikation der betroffenen Geräte:**

Beatmungsgeräte der Baureihen prismaVENT 30, prismaVENT 30-C, prismaVENT 40, TIVAN 30 und TIVAN 40.

Artikelnummern: Siehe Anhang

Seriennummern: Siehe Anhang

Die betroffenen Geräte wurden im April 2022 ausgeliefert. Geräte mit Seriennummern, die im Anhang nicht aufgeführt sind, sind nicht betroffen.

**Beschreibung des Problems und der ermittelten Ursache:**

Während routinemäßiger Qualitätsprüfungen unserer Produkte wurde festgestellt, dass sich auf einer bestimmten Charge von Mainboards elektronische Bauelemente befinden, die sich unter Umständen nicht entsprechend ihrer Spezifikation verhalten können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese elektronischen Bauelemente zu einer Beeinflussung oder einem Ausfall der Beatmungsfunktion sowie zu einer eingeschränkten Funktion des Alarmsystems führen.

Stand heute sind keine Vorkommnisse aus dem Markt bekannt, die sich auf dieses Problem zurückführen lassen. Dennoch werden die betroffenen Geräte vorsorglich zurückgerufen und getauscht.

**Welche Maßnahmen sind durch den Adressaten zu ergreifen?**

- Bitte informieren Sie entsprechend ihre Mitarbeiter und betroffene Kunden über die potentielle Gefährdung.
- Bitte betroffene Geräte nicht an Betreiber / Patienten ausliefern. Die Geräte werden unverzüglich getauscht.
- Falls betroffene Geräte bereits zur Therapie eingesetzt werden, müssen sie ohne Verzögerung durch äquivalente Geräte ersetzt werden.
- Soll die Therapie bis zum Austausch des Geräts fortgesetzt werden, muss eine Überwachung der Sauerstoffsättigung des Patienten erfolgen. Kann diese Maßnahme von Ihnen nicht durchgeführt werden, sollten Sie eine Risiko-Nutzen-Analyse durchführen, um zu beurteilen, ob Sie die betroffenen Geräte weiterhin einsetzen sollten.

**Kenntnisnahme**

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieses Schreibens bzw. dessen Weiterleitung auf dem beigefügten Rückmeldeformular.

**Weitergabe der hier beschriebenen Informationen**

Bitte stellen Sie in Ihrer Organisation sicher, dass alle Anwender der o.g. Produkte und sonstige zu informierende Personen Kenntnis von dieser Sicherheitsinformation erhalten. Sofern Sie die Produkte an Dritte abgegeben haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieser Information weiter oder informieren Sie die unten angegebene Kontaktperson.

Die Maßnahme wird den zuständigen Behörden gemeldet und das Vorgehen abgestimmt.

Für Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner als Sicherheitsbeauftragter unter +49 40 54702 258 oder via Email unter [vigilance@loewensteinmedical.de](mailto:vigilance@loewensteinmedical.de) zur Verfügung.

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG bedauert die mit der Maßnahme einhergehenden Unannehmlichkeiten.

**Löwenstein Medical Technology**

**Löwenstein Medical  
Technology GmbH + Co. KG**  
Kronsaalweg 40  
22525 Hamburg, Deutschland  
T. +49 40 54702-0  
F. +49 40 54702-461  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Warenannahme**  
Doerriesweg 3, 22525 Hamburg

**Handelsregister**  
Amtsgericht Hamburg  
HRA 67 698  
EORI-Nr. DE 257 968 5  
Ust-IdNr. DE 118051598  
WEEE-Reg.-Nr. DE 63391140

**Gläubiger-ID**  
DE25ZZZ0000353957

**Bankverbindungen**  
Deutsche Bank AG Hamburg  
SWIFT DEUTDE33  
IBAN DE61200700000640305900  
Commerzbank AG Hamburg  
SWIFT DRESDE33  
IBAN DE68200800000507338800

**Komplementärin**  
Löwenstein Medical Technology  
Verwaltungs GmbH  
Sitz: Hamburg  
Amtsgericht Hamburg, HRB 8678  
Geschäftsführung:  
Benjamin Löwenstein  
Sascha Löwenstein



**Betroffene Geräte**

Seriennummer Gerät	Artikelnummer	Bezeichnung
32061486	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061487	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061488	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061489	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061490	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061491	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061495	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061496	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061497	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061498	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061499	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061500	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061501	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061502	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061503	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061504	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061505	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061508	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061525	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061543	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061602	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061603	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061604	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061605	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061606	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061608	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061609	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061610	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061611	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061612	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061615	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061616	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061617	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061618	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061619	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061620	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061621	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061622	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061623	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061624	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061625	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061626	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061628	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061632	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061637	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061638	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061639	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061640	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT



32061694	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061695	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061696	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061697	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061698	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061699	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061700	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061701	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061702	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061703	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061704	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061705	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061706	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061707	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061708	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061709	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061710	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061711	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061712	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061713	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061714	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061715	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061716	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061717	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061718	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061719	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061720	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061721	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061722	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061723	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061724	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32061725	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061726	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061727	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061728	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061729	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061730	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061731	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061732	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061733	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061734	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061735	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061736	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061737	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061738	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061739	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061740	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061741	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061742	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061743	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT



32061857	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061858	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061859	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061860	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061861	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061862	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061863	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061864	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061865	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061866	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061867	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061868	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061869	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061870	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061871	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061872	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061873	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061874	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061875	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061876	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061877	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061878	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061879	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061880	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061881	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061882	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061883	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061884	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061885	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061886	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061887	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061888	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061889	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061890	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061891	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061892	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061893	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061894	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061895	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061896	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061897	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061898	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061899	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061900	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061901	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061902	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061903	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061904	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061905	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061906	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT





32061960	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061961	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061962	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061963	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061964	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061965	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061967	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061969	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061970	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061971	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061972	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061973	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061974	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061975	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061976	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061977	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061978	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061979	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061980	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061981	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061982	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061983	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061984	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061985	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061986	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061987	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061988	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061989	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061990	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061991	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061992	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32061993	29510LD0	TIVAN 40, GRUNDGERÄT
32061994	29510LD0	TIVAN 40, GRUNDGERÄT
32061995	29510LD0	TIVAN 40, GRUNDGERÄT
32061996	29510LD0	TIVAN 40, GRUNDGERÄT
32061997	29510LD0	TIVAN 40, GRUNDGERÄT
32061998	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32061999	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062000	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062001	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062002	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062003	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062004	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062005	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062006	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062007	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062009	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062010	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062011	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062023	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT

32062026	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062027	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062029	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062032	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062034	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062035	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062037	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062038	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062039	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062040	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062041	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062042	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062043	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062045	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062047	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062058	29310LD0	TIVAN 30, GRUNDGERÄT
32062064	29310LD0	TIVAN 30, GRUNDGERÄT
32062070	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062072	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062095	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062103	29530	PRISMA VENT30-C, GRUNDGERÄT
32062105	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062106	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062108	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062109	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062118	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062120	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062123	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062125	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062137	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062139	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062142	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062143	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062145	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062146	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062147	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062148	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062149	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062150	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062151	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062152	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062153	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062155	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062157	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062158	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062159	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062160	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062161	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062162	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062183	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT

32062184	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062185	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062186	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062187	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062188	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062189	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062190	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062191	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062192	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062193	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062194	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062195	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062197	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062198	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062200	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062206	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062217	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062220	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062222	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062223	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062224	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062225	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062226	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062227	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062228	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062230	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062232	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062237	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062241	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062245	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062248	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062249	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062251	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062252	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062253	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062254	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062255	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062256	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062257	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062258	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062259	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062260	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062261	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062262	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062263	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062264	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062265	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062266	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062267	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062268	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT

32062269	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062270	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062271	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062272	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062273	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062274	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062275	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062276	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062277	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062278	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062279	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062280	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062281	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062282	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062283	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062284	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062285	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062286	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062287	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062288	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062289	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062290	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062291	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062293	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062309	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062310	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062311	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062312	29310	PRISMA VENT30, GRUNDGERÄT
32062325	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT
32062327	29510	PRISMA VENT40, GRUNDGERÄT

# RÜCKMELDUNG

zur Sicherheitsinformation „Rückruf der Beatmungsgeräte prismaVENT 30,  
prismaVENT 30-C, prismaVENT 40, TIVAN 30 und TIVAN 40“

Originalschreiben erging an:

«Name»  
«Kontaktperson»  
«Straße»  
«PLZ» «Ort»  
«Land»

Bitte senden Sie uns dieses Rückmeldeformular vollständig ausgefüllt per Fax, Email oder Post an:

Fax: **+49 40 547 02-476**

Email: [customerservice@loewensteinmedical.de](mailto:customerservice@loewensteinmedical.de)

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG  
Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg  
Deutschland

Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen:

- Firmenangaben sind identisch zu obigem Adressfeld
- Firmenangaben sind abweichend zu obigem Adressfeld. Die Firmenangaben lauten wie folgt:

Ihre Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma + Anschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Hiermit bestätige ich den Erhalt des Sicherheitshinweises und dass ich den Inhalt gelesen und verstanden habe. Alle Anwender des Produkts und sonstige zu informierende Personen in meiner Organisation haben Kenntnis von diesem Schreiben erhalten.

Sofern wir die Produkte an Dritte abgegeben haben, wurde eine Kopie dieses Schreibens an diese weitergeleitet.

\_\_\_\_\_  
Name (in Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Position