



KONICA MINOLTA

Wichtiger Sicherheitshinweis

Name des betroffenen Produktes: ULTRASOUND SYSTEM SONIMAGE HS1

FSCA-Nummer: FSCA_KM20171212

Art der Modifizierung: Austausch des Netzteils

Datum: 13.12.2017

Gerichtet an: SONIMAGE HS1 Kunden

Details des betroffenen Gerätes:

Markenname: ULTRASOUND SYSTEM SONIMAGE HS1

Seriennummern: Alle Geräte der Modellnummern A8AR, A8WA, A9RP und A9RR

Problembeschreibung:

Durch die Bewegung des Kabels am Netzteil, kann es zu einer Beschädigung der Kontaktstellen (Lötunkte) im Inneren des Netzteils kommen. Durch diese Beschädigung kann es zu einer Erhitzung und zu einer Rauchentwicklung kommen. Ein Brandrisiko ist als gering einzuschätzen, da es sich bei dem verwendeten Material um schwer entflammbares Material handelt.

Durchzuführende Maßnahmen:

- 1) Informationsverteilung an alle Nutzer des Gerätes
- 2) Austausch der betroffenen Netzteile durch entsprechend verbesserte Netzteile.

Hinweis an alle Nutzer:

- Bei der Verwendung des betroffenen Netzteils bis zum Austausch, ist darauf zu achten, dass das Kabel am Netzteil nicht mechanisch belastet, ins Besondere nicht geknickt, gezogen oder gedrückt wird.
- Der zuständige Händler wird über den geplanten Austauschtermin informieren.

Kontaktperson:

Name: Patrick Callens

Organisation: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Adresse: Hoogoorddreef 9, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands

Der Unterzeichnende bestätigt, dass dieser Hinweis an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergeleitet wurde.

