



Krankenhaus
Ansprechpartner
Straße

Ort

22.11.2006

Produktinformation zur Weiterentwicklung von Codman Hakim Ventilprogrammieren für die Hydrozephalustherapie

Sehr geehrter „Chefarzt“,

Ihre Klinik verwendet für die Ventileinstellung der CODMAN HAKIM Programmierbaren Ventile, die von uns vertriebenen Ventilprogrammierer.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in den vergangenen Jahren unsere Ventilprogrammierer kontinuierlich weiterentwickelt haben, um den Anforderungen in der täglichen Praxis zu entsprechen.

Die Weiterentwicklung bezieht sich u.a. auf die erhöhte magnetische Feldstärke und die sich daraus ergebende Möglichkeit, Schwierigkeiten beim Verstellen der Druckstufen aufgrund von Proteinablagerungen eher zu beheben als es bei der ersten Generation (Artikel-Nr. 82-3126) möglich war.

Beim Einsatz von Programmierern der neuen Generation, die über eine ca. 3-fach höhere Magnetfeldstärke verfügen, können Explantationen der Ventile sehr häufig vermieden werden.

Unsere Medizinprodukteberater haben in der Vergangenheit die neue Generation der Programmierer in Ihrem Haus vorgestellt und wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie diese immer kurzfristig über uns beziehen können.

Bei einem medizinischen Notfall können wir Ihnen einen Programmierer der neuen Generation innerhalb von 24 Stunden kurzfristig zur Therapie überlassen. Bitte wenden Sie sich in solch einem Fall direkt an Ihren zuständigen CODMAN-Medizinprodukteberater oder rufen Sie uns unter der Tel.-Nr.

Wir möchten Ihnen empfehlen zu überprüfen, mit welchem Gerät bei Ihnen im Haus gearbeitet wird, damit Sie wissen, ob Sie gegebenenfalls den Bedarf für ein stärkeres Gerät haben, um auftretenden Patientensituationen gerecht werden zu können.

Mit freundlichen Grüßen