

### BREAS PV101/102 und 101+/102+




Für alle Geräte vom Typ BREAS PV 101/102 und 101+/102+ wurde das Wechselintervall der Antriebseinheit auf 15.000 Betriebsstunden begrenzt, um ihnen ein Höchstmaß an Funktionssicherheit zu bieten.

Über diesen Zeitraum hinaus kann es in sehr seltenen Fällen zu einem Schaden der Antriebseinheit kommen. In diesem Fall wird die Beatmung nicht fortgesetzt. Im Fehlerfall alarmiert das Beatmungsgerät akustisch und optisch den Benutzer über den Funktionsfehler.

Als Anwender können Sie die Betriebsstunden an der Rückseite des Beatmungsgerätes ablesen.

Betriebsstundenzähler

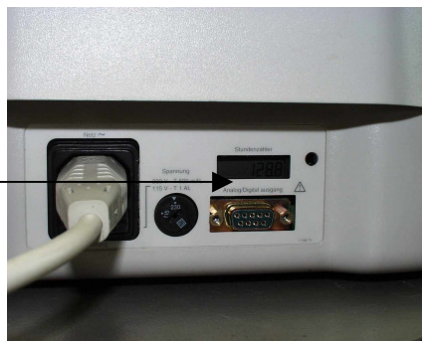

Im Zuge der Regelwartung wird Ihr Fachhändler einen eventuell anstehenden Austausch vornehmen. Sollte bereits die Betriebsstundenzahl überschritten sein, wenden Sie sich an Ihren betreuenden Fachhändler.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler oder die nachfolgende BREAS Niederlassung zur Verfügung.

**BREAS Medical GmbH**  
**Bahnhofstr. 26**  
**82211 Herrsching**

**Telefon: 08152 3721 0**  
**Fax: 08152 3721 37**  
**mail: breas@breas.de**

Eventuell entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.